



ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

「ケアハート 口腔専科 入れ歯キレイ洗浄剤」 取扱説明書

使用方法

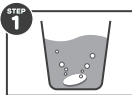

約 150mL の水または
お湯 (40~50℃) に
入れ歯キレイ洗浄剤を
1 錠入れてください。

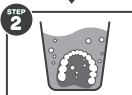

すぐに入れ歯を浸して
ください。



洗浄後は水でよくすすぎ、
残った洗浄液はすぐに
捨ててください。

家庭用品品質表示法に準ずる表示

品名	入れ歯洗浄剤	用途	入れ歯の洗浄
成分	発泡剤（重碳酸塩、クエン酸、炭酸塩）、 酸素系漂白剤（過硫酸塩）、 界面活性剤（アルファオレフィンスルホン酸塩）、 流動改善剤、香料、酵素、色素		
液性	中性	内容量	—

※普通の汚れの洗浄はぬるま湯で 5 分程度です。
※特にひどい汚れの場合は、一晩浸しておくとう
効果的です。

※水温が低いと発泡しにくくなり、効果が弱まり
ますので、40~50℃のお湯をおすすめします。
※入れ歯の浸け置き洗浄や保管には、専用ケース
「ケアハート 口腔専科 入れ歯キレイ保管ケース
（別売）」をおすすめします。

使用上の注意

●錠剤や洗浄液は口や目の中に入れてください。●葉や食品ではありませんので間違えて飲み込んだ
りしないように注意してください。●入れ歯が変色、変形することがありますので、60℃以上の熱湯では
使用しないでください。●入れ歯に使用されているごく一部の金属は変色することがありますので、その
場合はすぐに使用を中止して、歯科医師にご相談ください。●錠剤の包装は使用直前に開けてください。
開けたまま放置すると品質が低下し、発泡しないことがあります。●本製品は入れ歯の洗浄目的以外には
使用しないでください。●汚れが落ちない場合は、洗浄液を歯ブラシにつけて磨いてください。どうして
も落ちない場合は長期にわたる色素沈着や歯石の付着が考えられますので、歯科医師にご相談ください。

応急処置

- 目に入った場合は、こすらずに水で 15 分以上洗い
流してください。
- 誤って口に入った場合や、飲み込んだ場合は口をよ
くすすぎ、水または牛乳を飲ませてください。
- いずれの場合も異常が残る場合は本品と本書を持参
の上、医師にご相談ください。

保管上の注意

- 1) 使用の是非について自分で判断できない
方や子どもの手の届かない場所に保管し
てください。
- 2) 直射日光のあたるところや高温多湿なと
ころは避けて保管してください。

玉川衛材(株)お客様相談窓口

TEL.03-4334-8857

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

<https://www.tamagawa-eizai.co.jp>

タマガワエーザイ

発売元 玉川衛材株式会社

〒102-0071 東京都千代田区富士見1-8-19

MH12-T 日本製